

Ceramill Sintron (ZZ)

Поради щодо обробки


Заготовки Ceramill Sintron складаються з CoCrMo сплаву у формі зв'язаного металевого порошку. Сухий матеріал у початковому стані висушується без використання мастильно-охолоджуючої рідини (MOP), а потім спікається виключно у спеціальній високотемпературній печі (Ceramill Argotherm + камера для спікання Argovent) з попередньо запрограмованою програмою для спікання при подачі аргону. Під час роботи з Ceramill Sintron ми рекомендуємо:

ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОГРАМУВАННЯ САМ

Дизайнерське програмування САМ, завдяки корегуванню параметрів шару цементу та XY – розширення, може впливати на припасування каркасів. Стандартні показники з урахуванням специфіки матеріалу, як правило, вже є запрограмованими у Вашій системі та можуть змінюватись в залежності від фрезувального пристрою. Насамперед перевіряйте, будь ласка, на тестовій коронці, які параметри необхідно задати Вашій фрезувальній машині, для досягнення оптимального результату припасування.

ПРОГРАМУВАННЯ САМ

Ceramill Sintron ZZ може використовуватися в якості спеченої металевої заготовки. Для фрезувального пристрою Zirkonzahn використовується показник усадки S, який розташований на етикетці упаковки та на продукті.

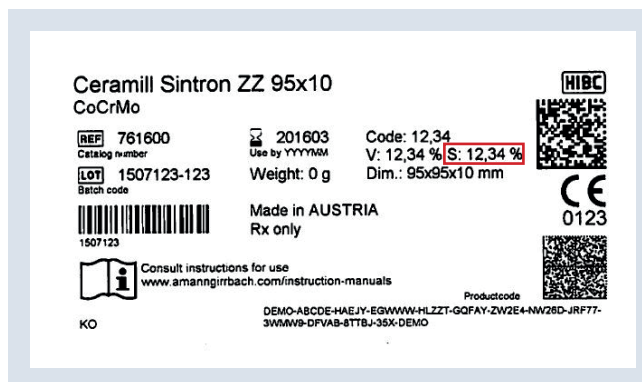

ФРЕЗУВАННЯ

Для обробки Ceramill Sintron можна використовувати звичайні фрези для циркону. Але, ці фрези рекомендується використовувати виключно для Sintron. Детальну інформацію щодо обробки Ви можете знайти на нашому сайті: www.amanngirrbach.com/instruction-manuals

Увага:



Для обробки Ceramill Sintron слід використовувати потужний пилосос.

Інші символи в інструкції

Символ Значення

REF Номер за каталогом

LOT Номер партії

 Виробник

 Дотримуватися інструкції

 Придатний до

 Знак відповідності технічним регламентам на медичні вироби та ідентифікаційний номер Органу з оцінки відповідності



Виробник:
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach,
AUSTRIA
Tel.: 0043- 5523 62333-0
Fax: 0043- 5523 55990
www.amanngirrbach.com
E-mail: austria@amanngirrbach.com

Аманн Гіррбах АГ
Хершафтсвісен 1, 6842, Коблах,
Австрія
Тел.: 0043- 5523 62333-0
Факс: 0043- 5523 55990
www.amanngirrbach.com E-mail:
austria@amanngirrbach.com



UA.TR.120

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія Дентек Лтд»
вул. Ділова, буд.16 оф.8, м. Київ, 03150,
Україна
Тел. (044) 498-28-51
E-mail: dentek@i.ua

